

SENZIMA

Logopedické a adaptívne pomôcky značiek TalkTools® a EazyHold®



Návod na použitie v slovenskom jazyku

BECKMANOVEJ TROJUHOLNÍK (Beckman Tri-Chew®)

Beckmanovej trojuholník sa používa na stimuláciu pier, ďasien a jazyka. Motivuje dieťa k prvým pokusom žuvania a hryzenia. Je vhodný pre deti, ktoré začínajú skúmať predmety ústami alebo majú zvýšenú citlivosť ústnej dutiny (odmietajú ústnu hygienu, kímenie lyžicou). Každá strana aj roh trojuholníka majú rôznu povrchovú úpravu (výstupky, špirálu a vrúbky), ktorá poskytuje pre pery, zuby a jazyk iný sensorický vnem. Používanie pomôcky posilňuje stabilitu sánky, upravuje intraorálnu senzitivitu (citlivosť ústnej dutiny) a vďaka rôznej povrchovej textúre postupne pripravuje dieťa na príjem potravy rôznej konzistencie.

Trojuholníkový tvar pomôcky umožňuje dieťaťu ľahký úchop a manipuláciu s pomôckou a tiež bráni v tom, aby si dieťa pomôcku vložilo hlboko do ústnej dutiny a spôsobilo si dávenie.

Výber tvrdosti pomôcky sa určuje podľa stability a sily čelustného svalstva dieťaťa. Pomôcka sa vyrába v troch rôznych tvrdostiach, rozlíšenými farbami:

- **žltý trojuholník** – mäkký, vhodný na masáž ďasien a prvé skúmanie ústami a pre deti, ktoré majú slabé čelustné svaly a vysokú intraorálnu senzitivitu, odporúčaný vek od 6 do 24 mesiacov
- **modrý trojuholník** – stredne tvrdý, vhodný pri prerezávaní prvých zúbkov a stimuláciu žuvania a hryzenia, odporúčaný vek od 6 do 24 mesiacov
- **zelený trojuholník** – tvrdý, vhodný pre deti, ktoré majú veľkú potrebu hrýzť a majú silný zhryz, odporúčaný vek od 3 do 6 rokov

S výberom pomôcky vám pomôže klinický logopéd vášho dieťaťa.

*Neodporúča sa na agresívne hryzenie

Pomôcku na stimuláciu ústnej dutiny vyvinula Debra Beckman.

Čistenie: Umývajte pred a po každom použití jemným mydlom. Poriadne opláchnite. Vždy skontrolujte známky poškodenia či zhoršenia stavu. Vhodné do umývačky riadu. Z hygienických dôvodov by každé dieťa malo mať svoje vlastné hryzadlo (Tri-Chew®).

Upozornenie: Hoci sú pomôcky na hryzenie vyrobené z odolného materiálu, žiadne hryzadlo nie je nezničiteľné. Niektorí jedinci (najmä tí so silnými orálnymi potrebami a agresívnym žuvaním) môžu pomôcku poškodiť. Pomôcku používajte pod dohľadom dospelého osoby. Pri spozorovaní známkov opotrebenia, pomôcku vymeňte. Nevhodné na agresívne žuvanie.

Vyrobené v USA, medicínsky stupeň, vyhovujúce FDA, bez obsahu olova, ftalátov, PVC, BPA či latexu.

Dovozca a predajca: Serenity, s.r.o. | Hurbanovo nám. 1 | Bratislava 811 06

SENZIMA

Prevádzkovateľ obchodu
Serenity, s.r.o.
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava
IČO: 44177364
DIČ: 2022615650
IČ DPH: SK2022615650

Odborné miesto
SENZIMA.sk
Krajinská 32
921 01 Piešťany
E: obchod@senzima.sk
T: +421 (0)33 39 19 058
Po-Pi: 9:00 – 14:00

www.senzima.sk