



Návod na použitie v slovenskom jazyku:

Sensi® - je vibračná orálne motorická pomôcka americkej spoločnosti Talk Tools®, ktorá pomáha vytvoriť orálny tonus a zlepšiť rôzne schopnosti ako rozprávanie, prehítanie a citlivosť úst. Používajte Sensi® na simuláciu rôznych pocitových skúseností a/ alebo cielených dotykových podnetov v ústnej dutine. Jemné vibrovanie poskytuje novú úroveň senzorickej stimulácie pre zvýšenie orálneho uvedomenia a sústredenia pozornosti na pery, jazyk, líca a čeluste. Vibrácie môže tiež navodiť upokojenie a príjemné pocity.

Sensi® - je pomôcka, ktorá prepája uhladený, inovatívny dizajn s ľahkou váhou rukoväte s jemnými hrbolčkami po celom obvode, ktoré zabránia vykĺznutiu z dlane. Hrbolčky môžete využiť aj na stimuláciu líc, predlaktia, rúk a pod. Docielite tak dodatočný dotykový podnet. Rukoväť sa dodáva s tyrkysovým žuvacím násadcom (<https://senzima.sk/obchod/senzi-a-vibracne-pomocky/zuvaci-nasadec/>).

Pre zapnutie pomôcky jednoducho stlačíte tlačidlo na rukoväti, až kým pomôcka nezačne vibrovať. Po opätovnom stlačení tlačidla prepnete intenzitu vibrovania prístroja. Na výber sú 4 rôzne druhy vibrácie, na ktoré prístroj upozorní aj svetelnou signalizáciou nad tlačidlom. Pozor! Nepoužívajte prílišnú silu pre zapnutie pomôcky, aby nedošlo k zničeniu vnútorného mechanizmu.

Sensi® je vyvinutý univerzálne, preto je k nemu dostupných viacero násadcov v rôznych tvaroch, veľkostiach, povrchoch a pružnostiach. Od lyžičiek cez kefy až po perá atď. Jednu rukoväť môžete použiť pre mnoho cieľov a aktivít, a to jednoduchou výmenou jedného násadca za iný. Pozrite sa na násadce v našej ponuke (www.senzima.sk). Násadce z rady Sensi na rukoväti vymeníte na jej širšom konci. **S logovibrátorom Sensi sú kompatibilné aj staršie násadce z rady Zvibe.** Staršie násadce z rady Zvibe vkladáte skrutkovaním na rukoväti na jej tenšom konci.

Senzi® - sa dodáva v transparentnom vrecúšku s jedným tyrkysovým žuvacím násadcom. Ďalšie násadce sa predávajú samostatne. Jedna batéria AAA je súčasťou balenia, ako aj brožúra s terapeutickými tipmi a radami od spoločnosti Talk Tools®. Sensi pomôcka je ca. 15,8 cm dlhá a má 1 až 1,5 cm priemer. Ide o pomôcku odporúčanú na použitie pre všetky vekové kategórie pod vedením terapeuta alebo školeného ošetrovateľa, či rodiča.

Viac informácií o produkte nájdete na: www.senzima.sk alebo na www.talktools.com

