

SENZIMA

Logopedické a adaptívne pomôcky značiek TalkTools® a EazyHold®



Návod na použitie v slovenskom jazyku

TERAPEUTICKÁ LYŽIČKA * Johnson Therapeutic, LLC (Large Textured Spoon)

Navrhnutá na orálnu senzorickú stimuláciu počas kŕmenia.

- Pred a po každom použití umyte ručne vodou a saponátom na riad.
- Neodporúča sa umývať v umývačke riadu.
- Každý produkt by mala používať len jedna osoba.
- Skontrolujte pred a po každom použití.
- Vymeňte výrobok, ak sa objavia škrabance, alebo iné známky poškodenia.
- Používajte iba pod dohľadom dospelšej osoby.

UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný používať na nácvik hryzenia. Nepoužívajte pomôcku pri prerezávaní zubov alebo na hryzenie. Tento produkt je vyrobený z plastu a môže sa hryzením odštipnúť, alebo zlomiť.

Vyrobené v USA, medicínsky stupeň, vyhovujúce FDA, bez obsahu olova, ftalátov, PVC, BPA či latexu.
Dovozca a predajca: Serenity, s.r.o. | Hurbanovo nám. 1 | Bratislava 811 06

SENZIMA

Prevádzkovateľ obchodu
Serenity, s.r.o.
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava
IČO: 44177364
DIČ: 2022615650
IČ DPH: SK2022615650

Odborné miesto
SENZIMA.sk
Krajinská 32
921 01 Piešťany
E: obchod@senzima.sk
T: +421 (0)33 39 19 058
Po-Pi: 9:00 – 14:00

www.senzima.sk