

SENZIMA

Logopedické a adaptívne pomôcky značiek TalkTools® a EazyHold



Návod na použitie v slovenskom jazyku

Vidlička - Magenta set TalkTools®

Vidličky sú dizajnové, veľkostne a kvalitatívne prispôsobené obľúbeným Magenta lyžičkám, alebo textúrovaným plochým lyžičkám

Základné pokyny pri kŕmení inej osoby:

Začnite tým, že sa ubezpečíte, že klient sedí a je v stabilnej polohe. Naplňte vidličku požadovaným jedlom. Držte vidličku dominantnou rukou. V prípade potreby podprite klientovu čeľusť vašou nedominantnou rukou. Vložte vidličku do úst (bez tlaku na špičku/hrot jazyka). Po dosiahnutí uzavretia pier vyťahnite vidličku vodorovne. Opakujte, aby ste podporili motorické procesy, pokiaľ nedosiahnete zautomatizované kŕmenie vidličkou.

Pokyny pre starostlivosť pred a po použití:

Starostlivosť: Pred prvým použitím umyte horúcou vodou a jemným čistiacim prostriedkom, potom opláchnite. Po každom použití pomôcku dôkladne opláchnite a pred uskladnením nechajte uschnúť. Na umývanie v umývačke riadu sa odporúča použiť iba horný kôš umývačky.

Upozornenie:

Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu udusenía, skontrolujte pomôcku pred každým použitím. Vidličky by sa mali vymeniť v prípade, že spozorujete známky opotrebovania alebo poškodenia. Nenechávajte dieťa s pomôckou bez dozoru.

Vyrobené v USA, medicínsky stupeň, vyhovujúce FDA, bez obsahu olova, ftalátov, PVC, BPA či latexu.

Dovozca a predajca: Serenity, s.r.o. | Hurbanovo nám. 1 | Bratislava 811 06

SENZIMA

Prevádzkovateľ obchodu
Serenity, s.r.o.
Hurbanovo nám. 1
811 06 Bratislava
IČO: 44177364
DIČ: 2022615650
IČ DPH: SK2022615650

Odborné miesto
SENZIMA.sk
Krajinská 32
921 01 Piešťany
E: obchod@senzima.sk
T: +421 (0)33 39 19 058
Po-Pi: 9:00 – 14:00

www.senzima.sk