



## Návod na použitie v slovenskom jazyku

### Hryzacie bloky (kat. č. 1521)

Táto logopedická pomôcka sa využíva v rámci čelustného rehabilitačného programu na diagnostiku aj terapiu (tiež terapiu orálnej pozície) stability a sily čeľuste a tiež pohybu a polohy sánky. Umožňuje nácvik symetrickej sily čeľuste, postupného zväčšovania alebo zmenšovania čelustného uhla a nakoniec plynulého pohybu sánky. Je to výborná pomôcka pri terapii dyzartrie, apraxie, dyspraxie.

- V ponuke máme **hryzacie bloky červené – tvrdé** a **hryzacie bloky fialové – mäkké**. V rámci terapie je možné nasadiť postupne najprv bloky mäkké a následne tvrdé.
- Každé balenie obsahuje dve sady hryzacích blokov.
- Logopedické pomôcky sú vyrobené z kvalitného, bezpečného, odolného a ľahko umývateľného materiálu.

**Starostlivosť:** Pred prvým použitím umyte horúcou vodou a jemným čistiacim prostriedkom, potom opláchnite. Po každom použití pomôcku dôkladne opláchnite a pred uskladnením nechajte uschnúť.

**Upozornenie:** Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu udusenía, skontrolujte pomôcku pred každým použitím. Hryzacie bloky by sa mali vymeniť v prípade, že spozorujete známky opotrebovania alebo poškodenia.

**Upozornenie: Nenechávajte dieťa s pomôckou bez dozoru.**

Distribútor: spoločnosť TalkTools®, USA

Predajca: Serenity, s.r.o. | Hurbanovo nám. 1 | Bratislava 811 06 IČO: 44177364 | DIČ: 2022615650 |  
IČ DPH: SK2022615650 [www.senzima.sk](http://www.senzima.sk)